

Dudas, Consultas?
0800-333-4272
Línea gratuita Evatest®



Si desea mayor información comuníquese de Lunes a Viernes
8:30 a 14:30 hs

Personal capacitado atenderá gustosamente su consulta en forma totalmente confidencial.

EVATEST



Test Rápido de Embarazo

Elea

Con tecnología
color control

EasyPlus

Para hacer en cualquier momento del día en **sólo 3 minutos**

12 ¿Cuánto tiempo permanecerá el resultado en la ventana antes de que desaparezca o cambie?
Un resultado positivo no cambiará aunque el fondo puede oscurecerse. Por otro lado, en un resultado negativo puede aparecer, pasados los 10 minutos, una línea muy tenue en la ventana de resultado. Esta línea se debe a un depósito de color y NO es un resultado positivo. Recuerde que NO se deben interpretar los resultados pasados los 10 minutos.

13 ¿La cantidad de líquido que ingiero ¿puede afectar mi resultado?
La ingesta excesiva de líquidos puede diluir la orina haciendo que la concentración de hCG disminuya. Es aconsejable no modificar su ingesta normal de líquidos.

Contenido del envase

La caja contiene en su interior:

- 1 envoltorio de aluminio cerrado herméticamente en cuyo interior hay 1 dispositivo para realizar 1 test.
- 1 manual de instrucciones.

El producto podrá ser utilizado una única vez debiendo ser descartado con posterioridad a su uso.

Condiciones de conservación del producto:

Almacenar a temperatura ambiente (entre 2°C y 30 °C). No congelar. En caso de que el dispositivo se haya conservado refrigerado, deje que alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba. El producto es estable hasta la fecha de vencimiento, siempre que el envoltorio de aluminio no haya sido abierto. No utilizar después de la fecha de vencimiento. Desechar junto con los residuos domiciliarios habituales.

¿DUDAS, CONSULTAS?

0800-333-4272 (Línea Gratuita EVATEST®). Si desea mayor información comuníquese de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas. Personal capacitado atenderá gustosamente su consulta en forma totalmente confidencial.

GARANTIA DE CALIDAD:

Laboratorio Elea Phoenix S.A. garantiza la calidad de el test de embarazo **EVATEST® Easy Plus** contra todo defecto de fabricación. Con la presentación de esta garantía, el dispositivo en donde no se haya marcado el control de función (la línea de color en la ventana de control) y tras nuestra inspección, se reemplazará -sin cargo- el test que muestre defectos de calidad.

Esta garantía no cubre los defectos causados por el manejo inadecuado del producto o que se haya apartado de las instrucciones de uso.

Elaborado por:

Abbot Diagnostics (Shanghai) Co., Ltd.
151 Libing Road, 200127 Shanghai, Pilot Free Trade Zone, China.

Importado y Acondicionado por:

Laboratorio Elea Phoenix S.A.
Avda. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. Autorizado por ANMAT. P.M. N° 1606-14.
www.evatest.com.ar

506922-00

Referencia bibliográfica

1) Lenton, E.A., Neal, L.M. and Sulaiman, R (1982). Plasma concentrations of human chorionic gonadotropin from the time of implantation until the second week of pregnancy. *Fertil. Vol. 37, p 773.* 2) Armstrong, E.G., Ehrlich, P.H., Birken, S., Schlatterer, J.P., Series, E., Hembree, W.C., and Canfield, R.E., J. Clin. Endocrinol (1984). Use of a Highly Sensitive and Specific Immunoradiometric Assay for Detection of Human Chorionic Gonadotropin in Urine of Normal, Non pregnant, and Pregnant Individuals. *Metab., Vol. 59, p. 867.* 3) Batzer, F.R. (1980). Hormonal evaluation of early pregnancy. *Fertil. Steril., Vol. 34, p. 1.* 4) Catt, K.J., Duran, M.L. and Vaitukaitis, J.L. (1975). Appearance of hCG in pregnancy plasma following the initiation of implantation of the blastocyst. *J. Clin. Endocrinol. Metab., Vol. 40, p. 537.* 5) Glenn D. Braunstein, Joan Rasor, Donald Adler, Hal Danzer, Maclyn E. Wade, M.D. (1976). Serum human chorionic gonadotropin levels throughout normal pregnancy. *Am. J. Obstet. Gynecol. 126:678.* 6) Braunstein, G.D., Vaitukaitis, J.L., Carbone, P.P., Ross, G.T., and Wade, M.E. (1973). Ectopic Production of Human Chorionic Gonadotropin by Neoplasms. *Ann. Intern. Med., Vol. 78, p. 39-45.* 7) Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma. *Bawood, M.Y., Saxena, B.B., and Landesman, R., Am. J. Obstet. Gynecol., Vol. 50, p. 172; 1977.* 8) Galfre, G., Howe, S.C., Milstein, C., Butcher, G.W., and Howard, J.C. (1977). Antibodies to major histocompatibility antigens produced by hybrid cell lines. *Nature, Vol. 266, p. 550.* 9) SPQ data on file. In a laboratory study that tested a minimum of 102 cycles, pregnancy could be detected in 7954 of the samples tested 6 days before the missed period (which is 5 days before the expected period). 10) Gnath C. and Johnson SR. Strips of hope - accuracy of home pregnancy tests and new developments. *Geburthilfe Frauenheilkd. 2014 Jul; 74(7): 661-669.* 11) Steier JA, Bergsjo P. and Myking OL (1984). Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion, and removed ectopic pregnancy. *Obstet Gynecol 64: 391-394.* 12) Nepomnaschy PA, et al. (2008). Urinary hCG patterns during the week following implantation. *Hum Reprod. 23 271-277.*

EVATEST® Easy Plus

EVATEST® Easy Plus es un test de embarazo que puede ser utilizado hasta 6 días antes de la fecha estimada de menstruación, es decir 5 días antes de la fecha en la que debería iniciarse el periodo. Si bien se puede realizar con la orina de cualquier momento del día (con una retención mínima de 3 horas), se recomienda utilizar la primera orina de la mañana, ya que la misma contiene una mayor concentración de la hormona del embarazo o hCG (gonadotropina coriónica humana). EVATEST® Easy Plus le puede indicar en solo 3 minutos si está embarazada o no, con una alta confiabilidad en su resultado.

Características del test

La prueba de detección temprana de embarazo **EVATEST® Easy Plus** cuenta con las siguientes características de diseño innovador:

- Varilla larga ergonómica diseñada para sostener el dispositivo correctamente bajo el chorro de orina.
- Una punta que cambia de color (de blanco a rosa) para saber si la orina fue absorbida, lo cual ayuda a que la prueba se realice más fácilmente.
- Ventana de resultados amplia y fácil de leer.



Descripción del test

La hCG (gonadotropina coriónica humana) es una hormona segregada por la placenta poco tiempo después de ocurrida la fecundación. La aparición y el incremento rápido de la concentración de esta hormona en la orina de la madre, hacen de la subunidad beta de la hCG (β -hCG) el indicador perfecto para la confirmación de la existencia del embarazo.

La avanzada tecnología de **EVATEST® Easy Plus** involucra la detección de la hCG en la orina, mediante el uso de anticuerpos monoclonales marcados con partículas de látex coloreadas, con un alto grado de sensibilidad y una alta confiabilidad en su resultado.

Presenta una precisión superior al 99% en la detección del embarazo desde el primer día de la fecha en la que debería iniciarse el periodo.

No abrir el envoltorio de aluminio que contiene el test antes de su uso.

Instrucciones de uso

Antes de abrir el envoltorio, lea cuidadosamente las instrucciones. El producto debe estar a temperatura ambiente. Tenga un reloj disponible.



Paso 1

- Abra el envase y retire el dispositivo.
- Quite la tapa protectora y exponga la lengüeta absorbente. Utilice el dispositivo de inmediato.
- Para realizar el test, coloque la lengüeta hacia abajo, colocando el dispositivo en contacto con el chorro de orina durante 5 segundos hasta que esté mojado y vire al color rosa.



Paso 2

- Retire el dispositivo del chorro de orina y coloque nuevamente la tapa protectora.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana con la ventana de control y la de resultado hacia arriba.



Paso 3

- Deje el dispositivo en esta posición y lea el resultado a los 3 minutos.

Importante: Los resultados deben ser interpretados en un lapso de **10 minutos** desde que se realizó la prueba. Ignore cualquier cambio una vez transcurrido ese tiempo.

3 min Test Rápido de Embarazo

EVATEST

Con tecnología
color control

Elea

Lectura del resultado

Debe esperar 3 minutos antes de leer el resultado. En la ventana de control debe aparecer siempre una línea azul. Esto indica que el test se realizó correctamente y que el dispositivo funciona bien.

Ventana de resultado (R) (muestra el resultado en 3 minutos).
Ventana de control (C) (siempre debe aparecer una línea azul).



RESULTADO NEGATIVO (Una sola línea visible)
Si observa una línea "vertical" azul en la ventana de control (C) y ninguna línea "vertical" en la ventana de resultado (R), significa que Ud. **"NO ESTÁ EMBARAZADA"**.




RESULTADO POSITIVO (Doble línea visible)
Si observa una línea "vertical" azul en la ventana de control (C) y una línea "vertical" azul en la ventana de resultado (R) Significa que Ud. **"ESTÁ EMBARAZADA"** (Independientemente de la intensidad del color). No importa si la línea vertical es más clara o más oscura que la otra, el resultado sigue siendo POSITIVO.



TEST INVÁLIDO

La ausencia de la línea en la ventana de control (C) indica que el test no ha sido realizado correctamente o que no se mantuvieron las condiciones apropiadas para la conservación del dispositivo. Es necesario repetir la prueba de embarazo con un nuevo dispositivo. (Ver Garantía de Calidad).

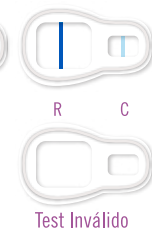

Advertencias y precauciones

Ciertas condiciones médicas tales como quistes ováricos o embarazos ectópicos pueden llevar a resultados incorrectos. Luego de un parto, el test puede arrojar resultados falsos positivos.

La utilización en tratamientos de fertilidad que utilicen hCG puede dar resultados falsos positivos. La hCG también se encuentra aumentada en la enfermedad gestacional o trofoblástica.

La hCG puede tener niveles bajos durante los primeros días del embarazo y por lo tanto el test puede arrojar resultados falsos negativos. En caso de obtener un resultado negativo y sospechar un embarazo reciente, el test debería repetirse dos o tres días después del primer resultado.

Especificaciones técnicas

EVATEST® Easy Plus es una tira reactiva basada en la técnica de inmunocromatografía tipo sándwich. Esta tecnología utiliza anticuerpos monoclonales, dirigidos contra la subunidad β de la hCG, marcados con partículas de látex. Estos anticuerpos se unen a la hCG y precipitan formando una línea coloreada en la ventana de resultado.

- **Sensibilidad:** EVATEST® Easy Plus puede detectar niveles de hCG a partir de 10 mUI/ml, medida contra el 4to estándar internacional de O.M.S.
- **Exactitud:** Superior al 99%, a partir del día en el que debería iniciarse su periodo menstrual.

"Ensayo orientativo para la autodetección de hCG sin valor diagnóstico. Ante cualquier duda consulte a su médico."

Algunas preguntas y respuestas

- 1 **¿Cómo funciona EVATEST® Easy Plus?**
Cuando se está embarazada, el organismo produce la hormona del embarazo (hCG o gonadotropina coriónica humana). Esta prueba puede detectar pequeñas cantidades de la hCG en su orina (la sensibilidad de esta prueba es de 10 mIU/ml). Se puede utilizar hasta 6 días antes de la ausencia del periodo, es decir, 5 días antes de la fecha en la que debería iniciarse el periodo. Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse el periodo y el resultado es de "No Embarazada", aún existe la posibilidad de que si lo esté. Consulte la tabla que se muestra a continuación, para ver los resultados de las pruebas de laboratorio con muestras de orina usando EVATEST® Easy Plus en etapas tempranas del embarazo.

Días antes de la fecha esperada de menstruación	% mujeres embarazadas que obtuvieron resultados (+) positivos con EVATEST® Easy Plus
0	>99%
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	79%

- 2 **¿Debe usarse la primera orina de la mañana?**
Si realiza el test antes de la fecha estimada de menstruación, recomendamos utilizar la primera orina de la mañana. De lo contrario podrá efectuar el test con la orina de cualquier momento del día (con una retención mínima de 3 horas).

- 3 **¿Cuál es la exactitud de EVATEST® Easy Plus?**
La exactitud de EVATEST® Easy Plus es superior al 99%, desde la fecha estimada de menstruación.

- 4 **¿Es correcto el resultado si estoy tomando medicamentos?**
El uso de preparados hormonales conteniendo gonadotropina coriónica humana, como también algunos tipos de enfermedades no comunes, pueden alterar el resultado. No se han detectado interferencias por el uso de otros medicamentos como citrato de clomifeno, analgésicos, alcohol, antibióticos o anticonceptivos. Tenga en cuenta que si dejó de tomar recientemente anticonceptivos o estuvo haciendo tratamientos de fertilidad, sus primeros periodos pueden ser irregulares, haciendo que realice la prueba antes de tiempo. Si se está acercando a la menopausia, puede obtener un resultado de embarazo falso a pesar de no estar embarazada. Ante cualquier duda recomendamos consultar con su médico.

- 5 **¿El tomar alcohol afecta el resultado?**
No. La ingesta de bebidas alcohólicas no afecta el resultado.

- 6 **¿Qué debo hacer si mi test indica positivo?**
Consultar con su médico sin demoras.

- 7 **La prueba dice que no estoy embarazada, pero sigo creyendo que podría estarlo. ¿Qué debo hacer?**
Puede que no esté embarazada, que el nivel de hCG no sea lo suficientemente alto para ser detectado, o que haya calculado mal el día en el que debería iniciarse el periodo. Si realizó la prueba de forma anticipada, realice la prueba nuevamente en la fecha en la que debería iniciarse el periodo. Si no le ha venido la menstruación, repita la prueba a los 3 días. Si obtiene un resultado de "No Embarazada" y sigue sin venirle el periodo, consulte a su médico.

- 8 **Realicé la prueba anteriormente y el resultado fue de "Embarazada". He vuelto a realizar la prueba y el resultado ha sido de "No Embarazada" o ha comenzado mi periodo. ¿Qué significa esto?**

Aunque la precisión de la prueba es superior al 99% en la detección de la hormona del embarazo a partir del día en el que debería iniciarse su periodo, es posible que se indique un resultado positivo que más tarde resulte ser negativo (es decir, que se obtenga un resultado negativo más adelante o que se inicie el periodo). Esto puede deberse a un aborto espontáneo durante las primeras fases de gestación, conocido como "aborto espontáneo precoz", y que, desgraciadamente, no es infrecuente, ya que se da aproximadamente en 1 de cada 4 embarazos. Si obtiene resultados inesperados, pida consejo a su médico.

- 9 **Cuando utilicé la prueba, la punta que cambia de color no se volvió completamente rosa. ¿Qué debo hacer?**

Puede que no haya aplicado suficiente orina; sin embargo, si la línea azul se muestra en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que esta ha funcionado. Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, ver **pregunta 10**.

- 10 **He realizado la prueba, pero no se ha mostrado ninguna línea azul en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?**

Si han transcurrido más de 10 minutos desde que realizó la prueba, entonces esta no ha funcionado. Causas posibles:
• La punta que cambia de color no se mantuvo apuntando hacia abajo o el dispositivo no se dejó en posición horizontal después de que se aplicara la orina.
• Se usó demasiada o muy poca orina.
Debe repetir la prueba con un dispositivo nuevo procurando seguir las instrucciones. Si prefiere, puede recolectar una muestra de orina en un recipiente limpio, y realizar la prueba utilizando el método de "recolección de muestra".

- 11 **¿Qué debo hacer si no estoy segura del resultado?**

La siguiente figura muestra los resultados que se pueden obtener al realizar la prueba de embarazo:
Figura A: El resultado es "No Embarazada". Si todavía cree que puede estar embarazada, vea la **pregunta 7**. Independientemente, consulte con su médico.

Figuras B-D: El resultado es "Embarazada". El aspecto de la línea en la ventana de resultado puede variar, sin embargo, sigue siendo un resultado "Embarazada" independientemente de lo oscura o clara que sea.

Figura B: Este resultado es más habitual cuando realiza la prueba antes de la fecha de inicio del periodo cuando los niveles de hCG pueden ser relativamente bajos.

Figura C: Este resultado es normal cuando realiza la prueba en la fecha en la que debería iniciarse el periodo o en días cercanos.

Figura D: Este resultado es más habitual cuando realiza la prueba varios días después de la fecha en la que debería iniciarse el periodo, puesto que los niveles de hCG son mayores. Si no está segura del resultado, debería esperar al menos 3 días antes de volver a realizar la prueba. Cuando la repita, siga las instrucciones con atención.

